

Berle předloketní francouzská duralová dlouhá

FD 93 dlouhá

Číslo výrobku: 793 141 148 000

PN 0471/E/96

1. Použití výrobku

Berle se používá při chůzi pro odlehčení dolní končetiny nebo při amputaci jedné dolní končetiny tak, že částečná váha těla spočívá na ruce držící rukojeť a opírající se o opěru předloktí.

Berle je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze (t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi) pro převážné zatížení vzpěrem. Berle není konstruována pro vyšší zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 150 kg !

2. Popis výrobku

Předloketní francouzská duralová berle **FD 93** má tyto části:

- a) monoblok (loketní opěrka s držadlem)
- b) nosník
- c) nástavec
- d) třmen kolíkem
- e) pouzdro
- f) násadec
- g) vymešovací vložka

Monoblok má ve spodní části vsazen nosník. Do dolního konce nosníku je pevně nasunuto pouzdro a suvně uložen s vložkou vymešující vůli mezi nosníkem a nástavcem. Nástavec umožňuje krokové nastavení délky berle po 25 mm s možností nastavení 11 délek berle. Poloha nástavce je zajištěna třmenem s kolíkem. Nástavec je ukončen protiskluzovým pryžovým násadcem.

3. Nastavení délky berle


- a) vyjme se třmen s kolíkem (d).
- b) vysune se nástavec (c) na potřebnou výšku.
- c) zpřesní se poloha otvorů v nosníku a nástavci a zasune třmen s kolíkem (d).

4. Hmotnost

Hmotnost berle **FD 93 dlouhá** cca 580 g

5. Rozměry

Délka berle min. (mm)	1090 ±10 mm
Délka berle max. (mm)	1340 ±10 mm
Vzdálenost držadla od lok.opěrky(mm)	235 ± 2 mm
Vzdálenost držadla od země min.(mm)	883 ±10 mm
Vzdálenost držadla od země max. (mm)	1133 ±10 mm

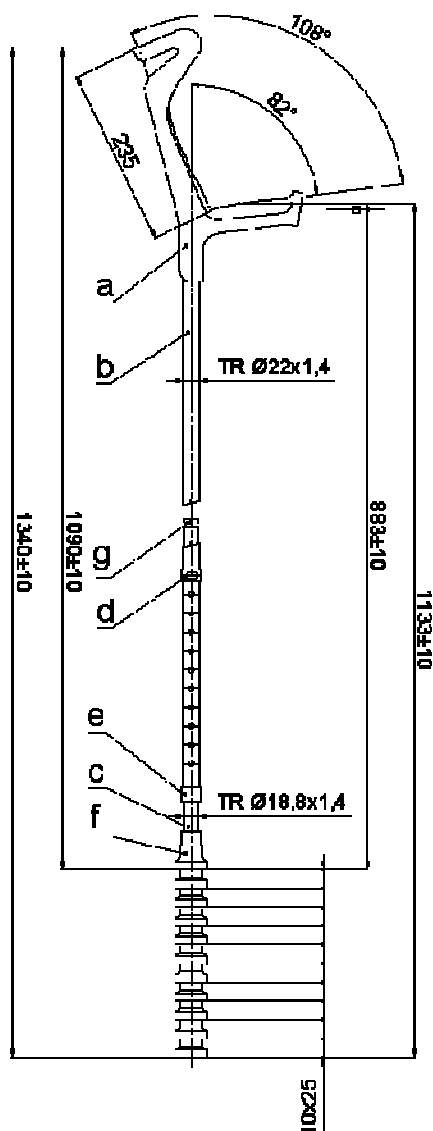

6. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů berle. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo berli vyřadit z používání. K čištění berle lze použít běžné saponátové přípravky a pak berli otřít do sucha.

Nesmí být použito organických rozpouštědel.

7. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Z Á R U Č N Í L I S T

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: **BERLE PŘEDLOKETNÍ FRANCOUZSKÁ DURALOVÁ**

TYP: FD 93 dlouhá

ČÍSLO VÝROBKU: 793 141 148 000

ČÍSLO PN: 0471/E/96



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebením berle způsobené jejím obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamacie se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: