

Berle sklopná francouzská speciální

BSF 07

Číslo výrobku: 793 141 124 000

PN 0226/E/06


1. Použití výrobku

Berle se používá při chůzi pro odlehčení dolní končetiny nebo při amputaci jedné dolní končetiny tak, že částečná váha těla spočívá na ruce držící rukojeť a opírající se o opěru předloktí.

Berle je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze (t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi) pro převážné zatížení vzpěrem. Berle není konstruována pro vyšší zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !

2. Popis výrobku

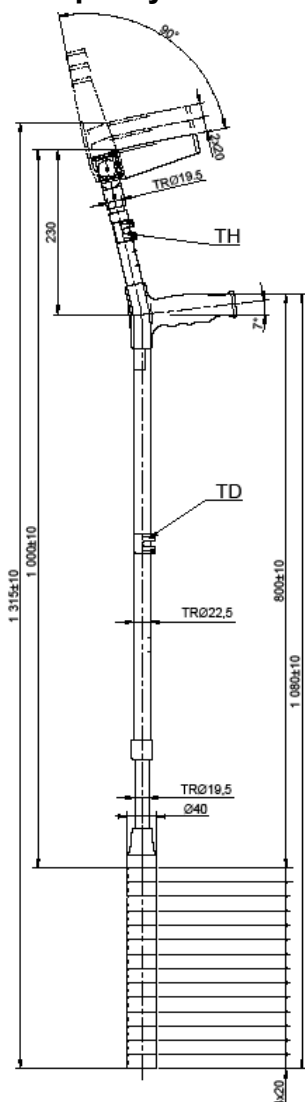

Berle sklopná francouzská speciální BSF 07 má tyto části:

- Nosník
- Dolní nástavec
- Horní nástavec
- Rukojeť
- Sklopná opěra předloktí
- Třmen s kolíkem (2x)
- Pouzdro dolní
- Pouzdro horní
- Vymezovací vložka (2x)
- Násadec

Na nosník je nasunuta samostatná rukojeť, na dolní konec plastové pouzdro dolní a na horní konec plastové pouzdro horní.

Do horní části nosníku je vsunut horní nástavec se sklopnou opěrou předloktí. V trubce horního nástavce je naražena plastová vymezovací vložka, která společně s pouzdem vymezuje vůli mezi horním nástavcem a nosníkem.

Do dolní části nosníku je vsunut dolní nástavec ukončený na spodní části protiskluzovým pryžovým násadcem s vloženou ocelovou podložkou. V horní části má naraženu plastovou vymezovací vložku, která společně s dolním pouzdem vymezuje vůli mezi nástavcem a nosníkem.

Vzájemná poloha nosníku a dolního nástavce (15 poloh nastavení výšky rukojeti) je zajištěna třmenem se dvěma kolíky zasunutými do některé dvojice otvorů v nosníku, a příslušných otvorů v dolním nástavci.

Vzájemná poloha nosníku a horního nástavce berle s opěrou předloktí (3 polohy vzdálenosti mezi rukojetí a sklopnou opěrou předloktí) je zajištěna třmenem se dvěma kolíky zasunutými do některých z přestavitelných tvorů v nosníku a v horním nástavci.

Rukojeť je opatřena měkkým potahem a v přední a zadní části odrazkami.

Objímka loketní opěrky je sklopná v rozsahu 90°, je pružná a umožňuje zajištění berle na ruce.

3. Nastavení délky berle

Při nastavování berle na potřebnou výšku se postupuje následujícím způsobem:

- vyjme se třmen s kolíky (TD).

- vysune se dolní nástavec na potřebnou výšku.
- zpřesní se poloha otvorů nosníku dolního nástavce a a zasune třmen s kolíky(TD).

Při nastavování berle na potřebnou vzdálenost mezi rukojetí a opěrou předloktí se postupuje následujícím způsobem:

- vyjme se třmen s kolíky(TH).
- vysune se horní nástavec s loketní opěrkou na potřebnou výšku
- zpřesní se poloha otvorů v nosníku a nástavci a zasune třmen s kolíky (TH).

4. Hmotnost

Hmotnost berle je cca 580 g ± 5%.

5. Rozměry

Délka berle min.	1000 ± 10 mm
Délka berle max.	1315 ± 10 mm
Vzdálenost rukojeti od země min.	800 ± 10 mm
Vzdálenost rukojeti od země max.	1080 ± 10 mm

6. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno zkontrolovat dotažení všech šroubových spojů a provést kontrolu dílů berle. Při případném poškození nebo opotřebení některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo berli vyřadit z používání.

K čištění berle lze použít běžné saponátové přípravky a pak berli otřít do sucha. Nesmí být použito organických rozpouštědel.

7. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Z Á R U Č N Í L I S T

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: **BERLE SKLOPNÁ FRANCOUZSKÁ SPECIÁLNÍ**

TYP: **BSF 07**

ČÍSLO VÝROBKU: **793 141 124 000**

ČÍSLO PN: **0226/E/06**



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebení berle způsobené jejím obvyklým užíváním podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: