

Berle sklopná francouzská speciální

PN 0226/E/06

BSF 07

1. Použití výrobku

Berle se používá při chůzi pro odlehčení dolní končetiny nebo při amputaci jedné dolní končetiny tak, že částečná váha těla spočívá na ruce držící rukojeť a opírající se o opěru předloktí.

Berle je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze (t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi) pro převážné zatížení vzpěrem. Berle není konstruována pro vyšší zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg!

2. Popis výrobku

Berle sklopná francouzská speciální BSF 07 má tyto části:


- 1) Nosník
- 2) Dolní nástavec
- 3) Horní nástavec
- 4) Rukojeť
- 5) Sklopná opěra předloktí
- 6) Třmen s kolíkem (2x)
- 7) Pojistná matice
- 8) Pouzdro
- 9) Vymezovací vložka (2x)
- 10) Násadec

Na nosník je nasunuta rukojeť, na dolní konec plastová pojistná matice a na horní konec plastové pouzdro. Do horní části nosníku je vsunut nástavec se sklopnou opěrou předloktí. V trubce nástavce je naražena plastová vymezovací vložka, která společně s pouzdem vymezuje vůli mezi horním nástavcem a nosníkem. Do dolní části nosníku je vsunut dolní nástavec ukončený na spodní části násadcem s vloženou ocelovou podložkou. V horní části má naraženu plastovou vymezovací vložku, která společně s pojistnou maticí vymezuje vůli mezi nástavcem a nosníkem. Vzájemná poloha nosníku a dolního nástavce (14 poloh nastavení výšky) je zajištěna třmenem se dvěma kolíky zasunutými do některé dvojice otvorů v nosníku, a příslušných otvorů v dolním nástavci, a pojištěna dotažením pojistné matice. Vzájemná poloha nosníku a nástavce berle s opěrou předloktí (3 polohy vzdálenosti mezi rukojetí a opěrou předloktí) je zajištěna třmenem s jedním kolíkem zasunutým do některého otvorů v nosníku a v horním nástavci. Rukojeť je opatřena měkkým potahem a odrazkami. Objímka loketní opěrky je sklopná v rozsahu 90°, je pružná a umožňuje zajištění berle na ruce pomocí pásky se suchým zipem.

3. Hmotnost

Hmotnost berle BSF 07

cca 640 g ± 3%

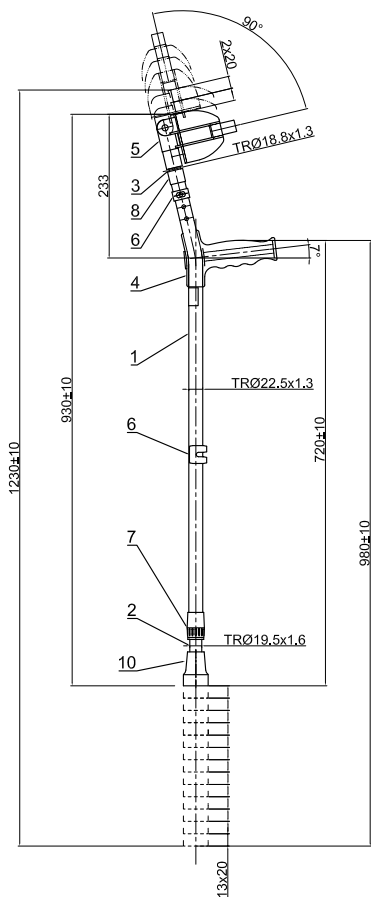

ERILENS s.r.o.

Papirenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA

tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz



4. Rozměry

Délka berle min.:	930 ± 10 mm
Délka berle max.:	1 230 ± 10 mm
Vzdálenost rukojeti od země min.:	720 ± 10 mm
Vzdálenost rukojeti od země max.:	980 ± 10 mm

5. Nastavení délky berle

Při nastavování berle na potřebnou výšku se postupuje následujícím způsobem:

- uvolní se pojistná matice otáčením proti směru hodinových ručiček
- vyjme se třmen s dvěma kolíky
- dolní nástavec se vysune na potřebnou výšku
- zpřesní se poloha otvorů nosníku dolního nástavce a zasune se třmen se dvěma kolíky
- provede se pojištění nastavené délky dotažením pojistné matice otáčením ve směru hodinových ručiček

Při nastavování berle na potřebnou vzdálenost mezi rukojetí a opěrou předloktí se postupuje následujícím způsobem:

- vyjme se třmen s jedním kolíkem
- vysune se horní nástavec s loketní opěrkou na potřebnou výšku
- zpřesní se poloha otvorů v nosníku a nástavci a zasune se třmen s jedním kolíkem

6. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno zkontrolovat dotažení všech šroubových spojů a provést kontrolu dílů berle. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo berli vyřadit z používání.

K čištění berle lze použít běžné saponátové přípravky a pak berli otřít do sucha.

Nesmí být použito organických rozpouštědel.

7. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

VÝROBEK: BERLE SKLOPNÁ FRANCOUZSKÁ SPECIÁLNÍ

TYP: BSF 07

ČÍSLO PN: 0226/E/06



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebením berle způsobené jejím obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb. Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

DATUM PRODEJE:

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 01.05.2021

RAZÍTKO PRODEJNY

 ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz

