

Hůl vycházková

H 81/1 - 2

Číslo výrobku: **793 141 468 ...**
PN **0278/E/89**


1. Použití výrobku

Hole se používá v případech, kdy je dostačující **pouze mírné** jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážné zatížení vzpěrem.

Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45° .

Hůl je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !

2. Popis výrobku

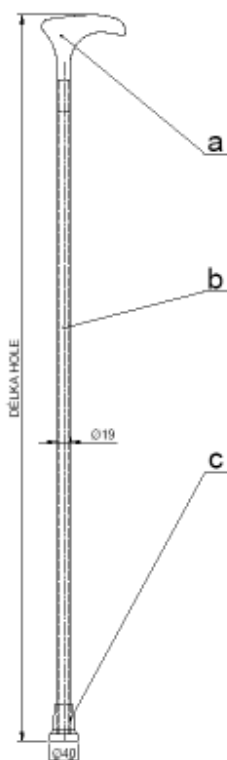

Hůl vycházková H 81 má tyto hlavní části:

- a) rukojeť
- b) duralový nosník
- c) násadec

Rukojeť z integrálního lehčeného polyuretanu je nasazena a zajištěna v duralové trubce ukončené na opačném konci násadcem.

Každé provedení hole, které se od sebe liší tvarem rukojeti, je vyráběno ve čtyřech velikostech (1 - 4).

3. Hmotnost

Hmotnost hole je cca 300 g.

4. Rozměry

Délka hole u provedení	H 81/1, H 81/2
velikost 1	850 mm
velikost 2	900 mm
velikost 3	950 mm
velikost 4	1000 mm

Drobnější úpravy délky hole lze provést uříznutím trubky a opětným nasazením násadce.

5. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů hole. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání.

K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha.

Nesmí být použito organických rozpouštědel.

6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Z Á R U Č N Í L I S T

VÝROBCE: **ERILENS S.R.O., PAPIRENSKÁ 114/5, 160 00 PRAHA 6**

VÝROBEK: **Hůl vycházková**

TYP: ČÍSLO VÝROBKU:

H 81/1 793 141 468 100

H 81/2 793 141 468 200

Velikost: 1 2 3 4

ČÍSLO PN: 0278/E/89



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebení hole způsobené jejím obvyklým užíváním podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: