


### 1. Použití výrobku

Hůl se používá v případech, kdy je dostačující pouze mírné jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážné zatížení vzpěrem. Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

**Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg!**

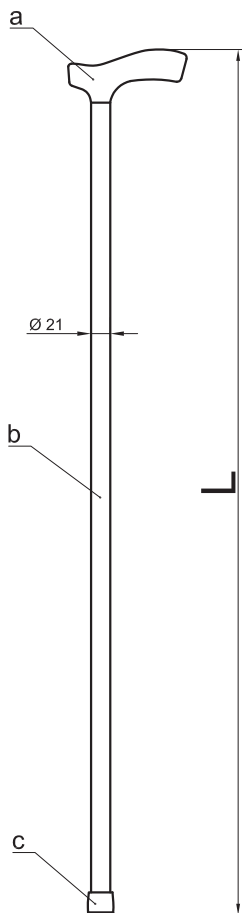

### 2. Popis výrobku

Hůl vycházková HD 95 má tyto hlavní části:

- a. rukojeť (rovná, zahnutá)
- b. nosník
- c. násadec

Rukojeť ze dřeva je nasazena a zalepena na dřevěném nosníku ukončeném na opačném konci pryžovým násadcem.

Každé provedení hole (HD 95/1 a HD 95/2), které se od sebe liší tvarem rukojeti, je vyráběno ve dvou velikostech (1,2).

### 3. Hmotnost

Hmotnost hole HD 95 je cca 300 g  $\pm$  3 %.

### 4. Rozměry

Délka hole velikost 1	850 mm
Délka hole velikost 2	950 mm

Drobnější úpravu délky lze provést po sejmutí násadce, uříznutím nosníku a opětným nasazením násadce.

## 5. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů hole. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání. K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha.

**Nesmí být použito organických rozpouštědel.**

## 6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z biologicky rozložitelného materiálu. Poškozený nebo nefunkční výrobek je možno odložit do sběru domovního odpadu.

# ZÁRUČNÍ LIST

**VÝROBCE:** ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

**VÝROBEK:** HŮL DŘEVĚNÁ

**TYP:** HD 95

**ČÍSLO PN:** 0488/E/95



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebením hole způsobeném jejím obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb. Reklamacce se uznává jen na základě předložením řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

**ZNAČKA KONTROLY:**



**DATUM PRODEJE:** .....

**DATUM POSLEDNÍ REVIZE:** 01.04.2020

**RAZÍTKO PRODEJNY**

 **ERILENS s.r.o.**

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA  
tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz

