

## Hůl berlová stavitelná


LYRA

Číslo výrobku: **793 141 455 300**  
PN **0800/E/12**

### 1. Použití výrobku

Hole se používá v případech, kdy je dostačující **pouze mírné** jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážně zatížení vzpěrem. Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

**Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 130 kg !**

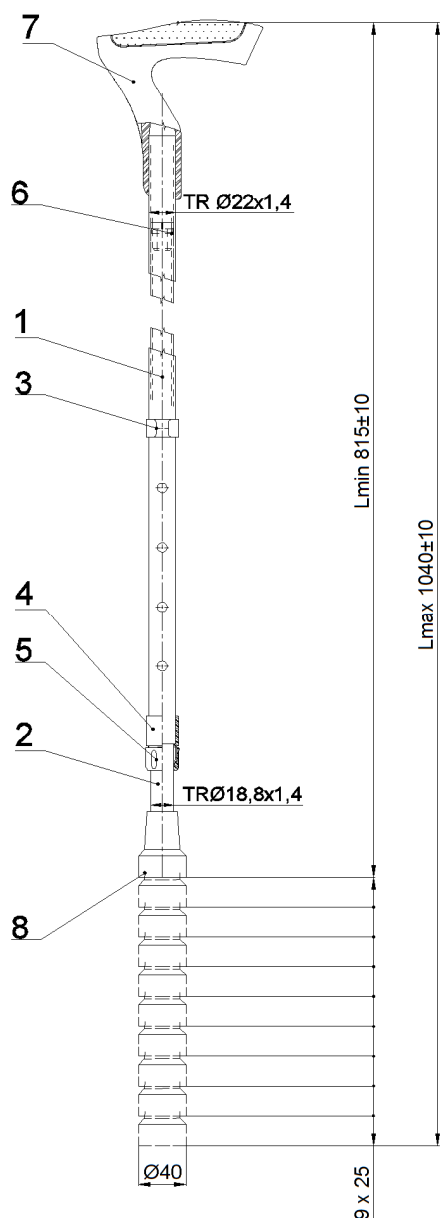

### 2. Popis výrobku

Hůl berlová stavitelná LYRA má tyto hlavní části:

1. nosník
2. nástavec
3. třmen kolíkem
4. pouzdro
5. závitová matice
6. vymezovací vložka
7. rukojeť
8. násadec

Rukojeť z polypropylenu s měkčením z TPE SANTOPRENE má ve spodní části vsazen nosník.

Na dolní konec nosníku je pevně nasunuto pouzdro s maticí a suvně uložen nástavec. Nástavec umožňuje krokové nastavení délky hole po 25 mm s možností nastavení 10 délek berle. Poloha nástavce je zajištěna třmenem s kolíkem a pojištěna dotažením matice pouzdra. Nástavec je ukončen pryžovým násadcem.

### 3. Nastavení délky hole

- a) povolí se závitová matice (5)
- b) vyjme se třmen s kolíkem (3).
- c) vysune se nástavec (2) na potřebnou výšku.
- d) zpřesní se poloha otvorů v nosníku a nástavci a zasune třmen s kolíkem (3).
- e) utáhne se závitová matice (5).

### 4. Hmotnost

Hmotnost hole je cca 460 g.

## 5. Rozměry

Délka hole	
Minimální (mm)	815 ±10
Maximální (mm)	1040 ±10

## 6. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů hole. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání.

K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha.

**Nesmí být použito organických rozpouštědel.**

## 7. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

---

### Z Á R U Č N Í L I S T

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: **Hůl berlová stavitelná**

TYP: **ČÍSLO VÝROBKU**

LYRA **793 141 455 300**

ČÍSLO PN: 0800/E/12



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebením hole způsobené jejím obvyklým užíváním podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: