


## Dlahy univerzální pro fixaci palce a prstů ruky typ J

Číslo výrobku: 793 141 332 000  
PN 0221/E/08

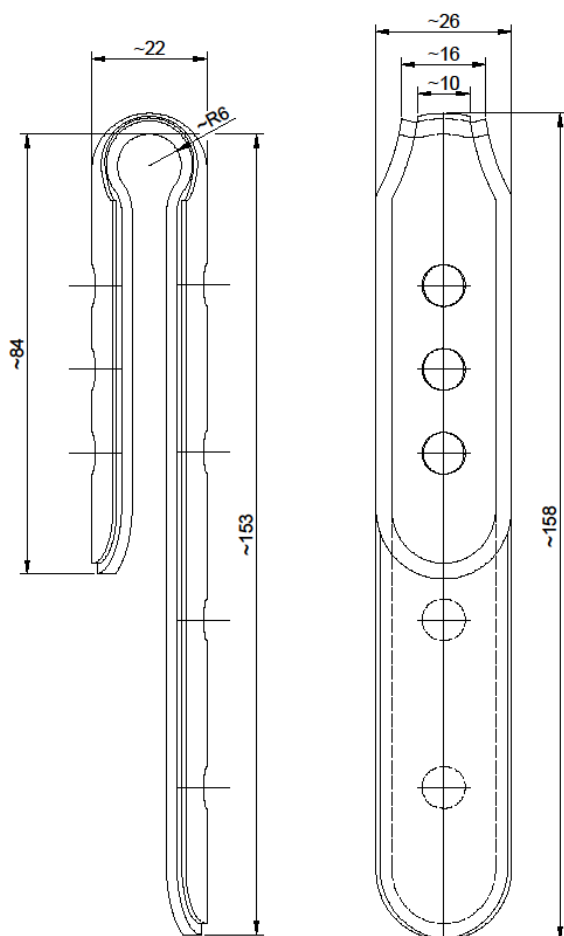

### 1. Použití výrobku

Dlahy se používají při ošetření poranění v oblasti prvního až třetího článku prstů ruky spolu se základním kloubem. Dlahou lze fixovat základní kloub palce a druhý článek palce ruky. Dlahy nutno přimodelovat a podložit měkkou výstelkou, nebo podkladem a fixovat obvazem či náplastí.

Dlahy lze použít volárně i dorsálně u prstů ruky s výjimkou palce.

Dlahy lze také použít při ošetření citlivých řezných poranění, zhmožděnin, poranění nehtu, při rupturách natahovačů prstů, distorzi kloubů, doléčení po zlomeninách a operacích na kostech prstů ruky a ve všech případech kdy je potřeba zklidnit poraněné části prstů a palce.

Dlahy nejsou určeny pro dislokované a nestabilní zlomeniny.

**Dlahy jsou nesterilní a jsou určeny pro jedno použití.**

### 2. Popis výrobku

Dlahy mají tyto hlavní části:

- a) vlastní dlahy
- b) výstelka

Dlahy jsou vyrobeny z hliníkového plechu, opatřeny měkkou perforovanou výstelkou a tvarovány tak, aby dostatečně kryly vnější a vnitřní části článků prstů ruky, případně jejich klouby. Dlahy lze dle účelu použití dotvarovat.

Dlahy se vyrábějí v jedné velikosti a v jednom provedení

### 3. Rozměry

Základní rozměry dlahy

	Délka 1	Délka 2	Šířka
Rozměr (mm)	155	87	19,5

#### **4. Hmotnost**

Průměrná hmotnost dlahy: cca 12 g

#### **5. Ekologická informace**

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

---

### **Z Á R U Č N Í L I S T**

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: **DLAHA UNIVERZÁLNÍ PRO FIXACI PALCE A PRSTŮ RUKY TYP J**

ČÍSLO VÝROBKU: **793 141 332 000**

ČÍSLO PN: **0221/E/08**



ZNAČKA KONTROLY:



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na vady použitého materiálu, nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst. 2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

Datum prodeje:

Razítko prodejny: