


Irigátor z PVC

Číslo výrobku: 793 139 901 000

PN 0462/E/93

1. Použití výrobku

Irigátor je lehká a skladná zdravotní pomůcka pro zavádění klystýru a k provádění výplachů s nezbytnou tělesnou hygienou.

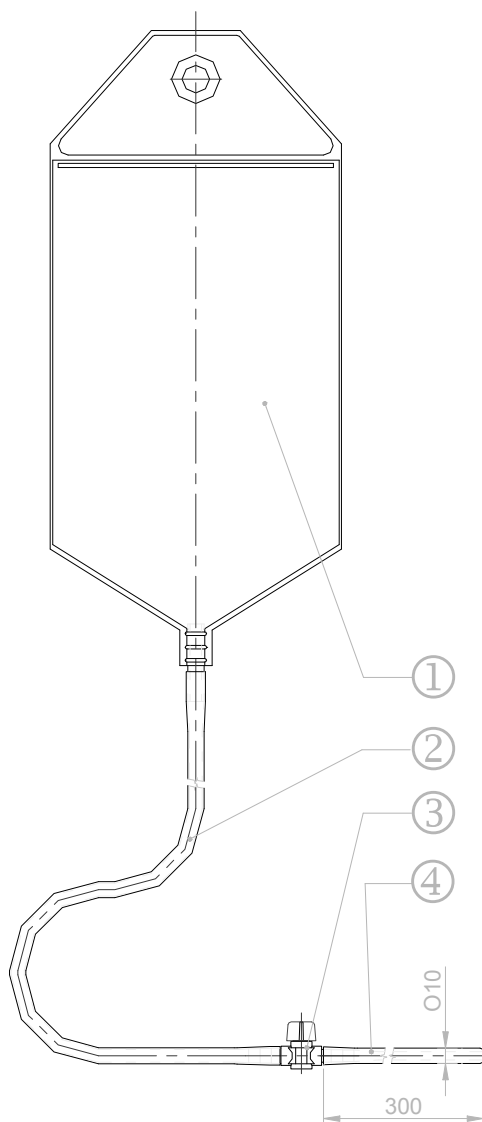

2. Popis výrobku

Hlavní části:

- Závěsná nádržka – cca 2 l
- Vývod
- Irigační hadice
- Dvoupolohový kohout
- Trubice do konečníku pro dospělé Ø 10 mm, délka 300 mm (dále jen trubice)

3. Sestavení irigátoru a obsluha

Na ústí nádržky ① (vývod) se navlékne irigační hadice ②. Pro její snadnější navlečení (zejména byli irigátor skladován v chladnějším prostředí) doporučujeme navlékaný konec irigační hadice promnout mezi prsty nebo na chvíli namočit do vody cca 60° teplé.

Na druhý konec hadice se nasadí dvoupolohový kohout ③, na něj přiložená trubice ④. Po sestavení irigátoru se uzavře kohout (ovládací páčka je kolmo na osu kohoutu) , nádržka se naplní tekutinou a zavěsí. Po zavedení trubice do konečníku se kohout otevře a tekutina začne proudit trubicí.

4. Hmotnost

Hmotnost je max. 300 g.

5. Údržba

Jednotlivé díly irigátoru lze sterilizovat varem, běžnou údržbu můžete provádět teplou vodou a mýdlem, či ostatními mycími prostředky.

Nepoužívat organická rozpouštědla!

6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin. Poškozený nebo nefunkční výrobek je možno odložit do sběru domovního odpadu.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: **IRIGÁTOR Z PVC**

ČÍSLO VÝROBKU: **793 139 901 000**

ČÍSLO PN: **0462/E/93**



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamáce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: