

Pravidelná kontrola asistenčních vaků podle ČSN EN ISO 10535:2021 - Kompenzační pomůcky – Zvedáky pro přepravu osob – Požadavky a zkušební metody. Příloha B – Pravidelná kontrola.

Aby byla zajištěna bezpečnost a správná funkce vaku, musí být vak zkontrolován před každým použitím. Kromě toho by měla být alespoň každých 6 měsíců provedena zdokumentovaná kontrola.

Pokud se vak používá nebo čistí častěji, než je obvyklé, mohou být vyžadovány častější kontroly.

Pravidelné kontroly by měla provádět osoba, která je vhodně a řádně kvalifikovaná a dobře obeznámená s konstrukcí, používáním a péčí o asistenční vaky a zvedací jednotky.

Informace	
vak / číslo produktu / velikost	
datum výroby / sériové číslo	
jméno uživatele	

Kontrola vaku	Odpověď / poznámka:
Je štítek vaku čitelný?	
Je materiál, ze kterého je vak vyroben, nepoškozený? - Nemá díry nebo trhliny? - Není abnormálně opotřebený?	
Jsou švy vaku, okrajový lem a poutka popruhů vaku neporušené?	
Je k dispozici návod k použití vaku?	
Existuje zkušební protokol vaku?	

Jiné další poznámky:

--

Vak byl schválen / neschválen	
Datum kontroly:	
Kontrolu provedl:	
Podpis osoby, která provedla kontrolu:	



Vaky, které nebyly schváleny po pravidelné kontrole je nutné vyřadit z provozu a zlikvidovat!